



## NAVODILA ZA ODVZEM VZORCEV BLATA

1. Vzorci blata se zbirajo tri dni, najbolje vsak drugi dan po en vzorec, lahko tudi vsak dan po en vzorec.  
Prvi in drugi vzorec shranite v vialo PROTO-FIX™, tretjega pa v prazno vialo CLEAN.
2. Pri odvzemu bodite pozorni, da blata ne kontaminirate z urinom ali vodo.
3. Odvzemite zadostno količino vzorca, in sicer toliko, da tekočina v viali doseže oznako FILL LINE (rdeča puščica).
4. Vialo dobro zaprite. Viali PROTO-FIX™, v kateri ste odvzeli prvi in drugi vzorec, po odvzemu vzorca dobro pretresite.
5. Na viali označite datum odvzema vzorca.
6. Viale shranite na sobni temperaturi, zaščitite jih pred neposredno sončno svetlobo in vročino.
7. Po odvzemu tretjega vzorca blata popolni set v najkrajšem možnem času vrnite vašemu izbranemu zdravniku.

## OPOZORILA

Tekočina PROTO-FIX™ je strupena in ni primerna za uživanje. Če jo zaužijete, pijte veliko vode ali mleka ter takoj obiščite zdravnika.

Izogibajte se kontaktu tekočine PROTO-FIX™ s kožo ali očmi. Če se to zgodi, del, ki je prišel v stik, izperite z veliko vode. V primeru, da se pojavi vnetje ali draženje, obiščite zdravnika.

Upoštevajte še ostala splošna navodila za ravnanje z blatom.